



ОМОЛОДЖЕННЯ З

ELLANSÉ

НОВІТНЯ ЕРА ПРАВИЛЬНОГО
КОЛАГЕНОУТВОРЕННЯ



ELLANSÉ – РЕГЕНЕРАТИВНИЙ,
ВОЛЮМІЗАЦІЙНИЙ ФІЛЕР НА
ОСНОВІ ПОЛІКАПРОЛАКТОНУ
ДЛЯ УСУНЕННЯ ОЗНАК
СТАРІННЯ.

**Ellansé представляє на світовому ринку
міжнародна фармацевтична компанія
Sinclair Pharma.**

Sinclair Pharma – один із світових лідерів у галузі
естетичної медицини, що спеціалізується на
розробці та створенні інноваційних продуктів
і технологій з 1971 року.

70
країн світу

Продукти компанії представлено
в 70 країнах світу.

40
років

Понад 40 років наукової
експертизи, передових розробок
та успішних випробувань.

3,5
млн

3,5 млн шприців препарату
застосовано з моменту лончу

Безпечне усунення справжньої причини старіння обличчя

- Безпечне омолодження шкіри завдяки фізіологічним процесам – довготривалій колагеностимуляції.
- Миттєва волюмізація, довготривалі результати.
- Омолодження шляхом використання природного механізму формування колагену.

ВОЛЮМІЗАЦІЯ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ЛІФТИНГ

РЕГЕНЕРАЦІЯ

ПЕРШИЙ ПРЕПАРАТ, ЯКИЙ НЕ ПРОСТО СТИМУЛЮЄ НЕОКОЛАГЕНЕЗ, А СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НОРМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ КОЛАГЕНУ В ШКІРІ.



УНІКАЛЬНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ СКЛАД



PCL
МІКРОСФЕРИ
СИНТЕТИЧНОГО
ПОЛІКАПРОЛАКТОНУ

Безпека PCL: біорезорбція та біодеградація з виділенням нетоксичних продуктів розпаду – CO₂ та H₂O.




КМЦ
ГЕЛЬ-НОСІЙ – ВОДНИЙ
РОЗЧИН КАРБОКСИМЕТИЛ-
ЦЕЛЮЛОЗИ

Карбоксиметилцелюлоза (КМЦ) – натуральний матеріал із целюлози, визнана фармацевтична допоміжна речовина (GRAS)*

* Загалом визнана безпечною ЗВБ.


МИТТЄВИЙ ОБ'ЄМ, ДОВГОСТРОКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

НОРМАЛІЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ШКІРИ ДО МОЛОДШОЇ ВІКОВОЇ НОРМИ

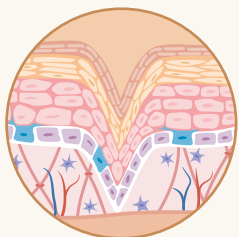


ДО ПРОЦЕДУРИ:

Втрата колагену, еластину та гіалуронової кислоти призводить до зморшок, складок і втрати об'єму.

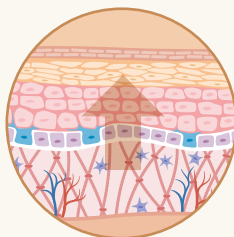

КРОК 1: МИТТЄВЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄМУ

Ellansé містить гладкі мікросфери, рівномірно розподілені в гелі-носії, які заповнюють ділянки шкіри, відновлюючи втрачений об'єм.

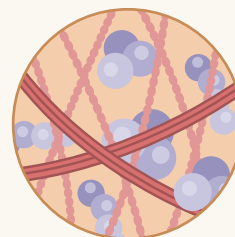

КРОК 2: СТИМУЛЯЦІЯ СИНТЕЗУ ВЛАСНОГО КОЛАГЕНУ

Протягом кількох місяців наявність гладких мікросфер посилює природний синтез колагену в шкірі. Мікросфери біодеградують із часом, а колагенові структури залишаються.

ІННОВАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ТА ОПТИМАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

- З моменту лончу в 2009 році Ellansé має відмінний профіль безпеки, що висвітлюється в клінічних випробуваннях та підтверджується експертами в щоденній практиці*.
- Приблизно 3,5 млн шприців було використано з моменту лончу препарату**
- Огляд побічних ефектів з лончу по серпень 2023 р. показав, що їхній рівень становить 0,0462%**.

*Christen MO, Vercesi.F. Polycaprolactone: Or How a Well-Known and Futuristic Polymer Has Become an Innovative Collagen-Stimulator in Aesthetics. Clin Cosmet and Investig Dermatol 2020; 12:1-18. **Ellansé PSUR and PMCF report, 2022; 2. Sinclair Data on file.

Біодеградація

- Мікросфери полікапролактону в Ellansé мають оптимальну біосумісність: гладеньку поверхню, сферичну форму, розмір 25–50 μm, повну біодеградацію з часом.
- Унікальний процес біодеградації дозволяє уникнути вираженого запалення та сприяє довготривалій стимуляції колагену I типу.
- Резорбція КМЦ відбувається через 2–3 місяці після ін'єкції.
- Ланцюги PCL Ellansé M довші, ніж у Ellansé S, та потребують більше часу для біодеградації.

ELLANSÉ
18 місяців

ELLANSÉ
24 місяці

Тобто тривалість ефекту залежить від довжини полімерних ланцюгів всередині мікросфер.



Ін'єкційний імплантат

Медичний виріб: клас III, заповнені шприци, готові до використання

2 шприци × 1 ml, 4 × 27G 3/4" голки

Курс процедур – одна процедура.

Повторна процедура за бажанням пацієнта через 6–8 тижнів або раніше для корекції інших зон.

Повторний курс – через 18–24 місяці.

Що таке Ellansé?

- Ellansé — дермальний філер на основі полі-ε-капролактону, який забезпечує миттєву волюмізацію та довгострокову колагеностимуляцію завдяки природним процесам.
- Філер Ellansé має сертифікацію CE 0344 і схвалений до використання в 70 країнах світу.
- Ellansé призначений для субдермальної імплантації в обличчя для довгострокової корекції зморшок та інших ознак старіння (атонія, зниження пружності та еластичності, втрата об'ємів, птоз).
- Ellansé зарекомендував себе як ефективний і безпечний засіб для волюмізації та омолодження.




Препарат Ellansé сертифікований в Україні та має сертифікацію відповідності вимогам до якості Європейського Союзу (CE) з 2009 року.

Країна виробництва продукту: Нідерланди

1. Ellansé Instructions for Use 2021, CE 0344; 2. Christen MO, et al. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2020;13:31–48; 3. Moers-Carpi MM, Sherwood S. Dermatol Surg. 2013;39:457–63; 4. Galadari H, et al. J Cosmet Dermatol. 2015;14:27–32.

Колагеновий скафолд залишається після того, як мікросфери біодеградують

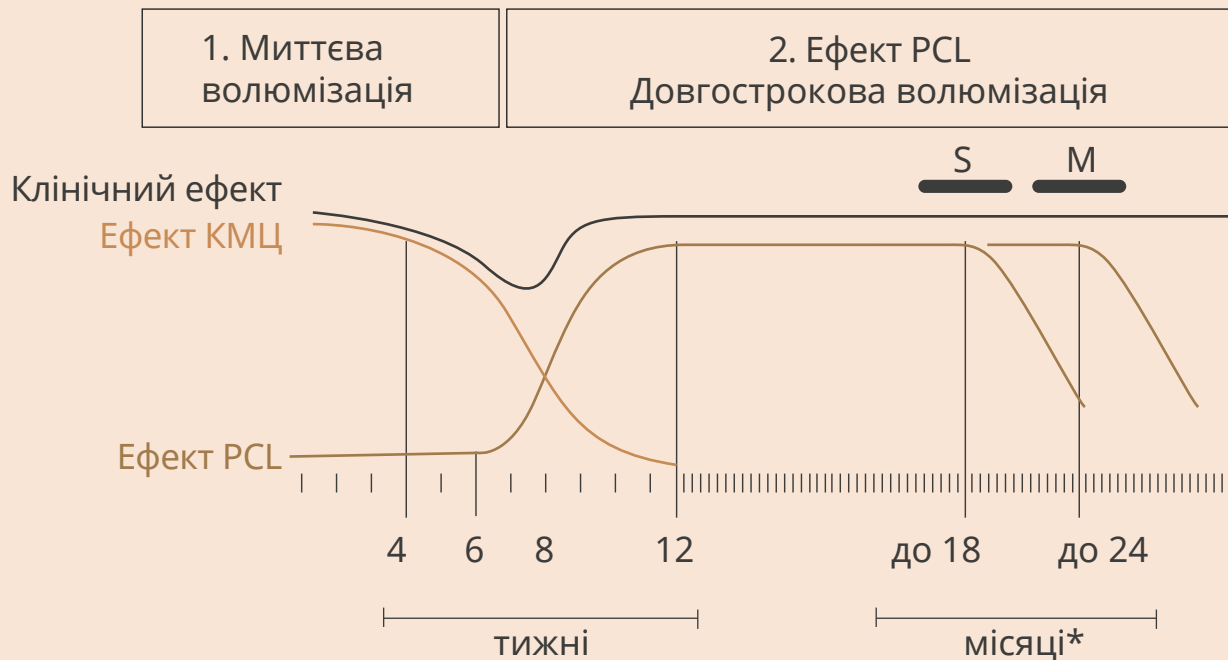

* Christen MO, et al. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2020;13:31-48; Loghem JV, et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2015 Jan;8(1):38-49

Зони корекції

ВЕРХНЯ ТРЕТИНА ОБЛИЧЧЯ

- A. Лоб*
 - B. Скроні
 - C. Зона брів
-

СЕРЕДНЯ ТРЕТИНА ОБЛИЧЧЯ

- D. Моделювання носа*
 - E. Аугментація малярної та виличної зони
 - F. Носогубні борозни
-

НИЖНЯ ТРЕТИНА ОБЛИЧЧЯ

- G. Кути рота
- H. Зморшки маріонетки
- I. Підборіддя
- J. Лінія нижньої щелепи



* процедури вищого рівня складності (для лікарів із досвідом ін'єктування від 30 шприців ELLANSE)

Не рекомендована корекція в зонах

- 1 Глabella
- 2 Повіки
- 3 "Гусячі лапки"
- 4 Періорбітальна зона
- 5 Губи



Протипоказання



Гіперчутливість до будь-якого компоненту



Гострі або хронічні захворювання шкіри



Схильність до формування келоїдних рубців



Сепсис або інфекція



Лактація



Вагітність



Тяжкі алергічні реакції в анамнезі



Лікування ГКС, антикоагулянтами



Порушення згортання крові



Аутоімунні захворювання

Чому саме Ellansé?


ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЛІКАРЯ



Високий профіль безпеки:
повна біодеградація
мікрочастинок PCL із часом



Прогнозований
результат

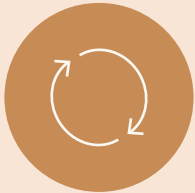

Персоналізований підхід.
Тривалість результату 18–24
місяців, залежно від препарату
(Ellansé S або Ellansé M)




Сертифікований у Європі
(CE) та Україні



Підходить для всіх
типів старіння
обличчя (включаючи
деформаційний)



Процедура не потребує
знеболювання та
розведення

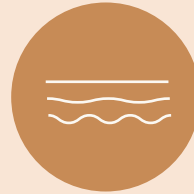


Висока волюмізаційна
здатність. Миттєва та помітна
корекція зморшок і складок



Омолодження шляхом
використання природного
механізму і правильного
колагеноутворення




Покращення якості
шкіри

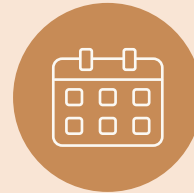

Короткий курс. Достатньо
однієї процедури для
досягнення бажаного
ефекту на 18 або 24 міс.



Відсутність реабілітаційного
періоду. Процедура
не обмежує соціальну
активність

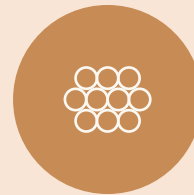


Відсутність
фібротичних змін

Результати використання



ПАЦІЄНКА, 59 РОКІВ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ: 2,8 мл Ellansé M

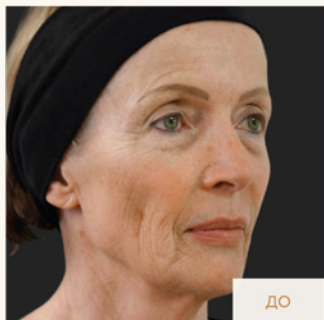

ДО



ЧЕРЕЗ 24 МІСЯЦІ

ДО ELLANSÉ M:


Помітні зморшки, втрата об'єму в середній і нижній третині.

ПІСЛЯ ELLANSÉ M:

Волумізація щік, зменшення зморшок маріонеток, пом'якшення носогубних складок, покращення якості шкіри.

ПАЦІЄНКА, 58 РОКІВ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ: 3,2 мл Ellansé S

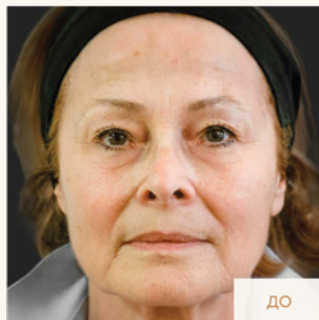

ДО




ЧЕРЕЗ 3 МІСЯЦІ

ДО ELLANSÉ S:


Глибокі зморшки та складки, виражені носогубні борозни, дрібні зморшки.

ПІСЛЯ ELLANSÉ S:


Покращення якості шкіри, зменшення вираженості носогубних складок, зменшення зморшок маріонеток.

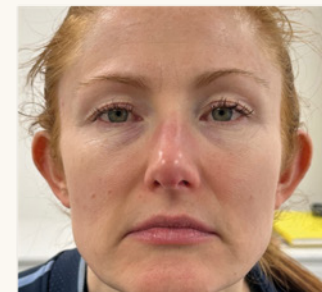

ДО

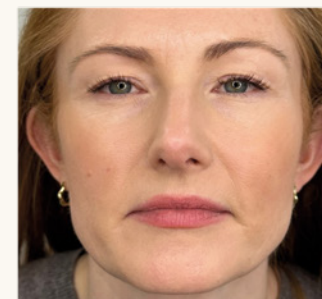

ЧЕРЕЗ 2 МІСЯЦІ

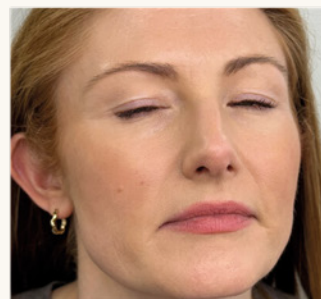

ПАЦІЄНКА, 43 РОКИ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄМ:
2 мл Ellansé S

ДО ELLANSÉ S:

Втрата об'єму в скроневій зоні, виражені носогубні складки, дрібні зморшки.

ПІСЛЯ ELLANSÉ S:

Покращення якості шкіри, виражений ліфтинг, зменшення вираженості носогубних складок.

Справжній пацієнт. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.



Б'ЮТИФІКАЦІЯ
Забезпечення балансу
та симетрії обличчя
або волюмізація



ОМОЛОДЖЕННЯ
Боротьба з ознаками
старіння



PRE-AGING
Превентивні заходи для
покращення якості шкіри



Завантажити гайд
для спеціалістів



Подати заявку
на проходження
навчання

06/2024

EMÉT

Офіційний дистриб'ютор Sinclair Pharma в Україні

emet.ua

emetua

t.me/emetua

067 880 77 00

info@emet.in.ua

emet.in.ua